

KB6100型气体终端

一、 产品简介

我公司在上海郊区设有 500 平米的加工制造工厂,专业生产医用气体的相关设备,气体终端是其中的一类产品。我公司的外销气体终端主要包括国标、美标、英标、德标四种,并可根据用户提供的实样或图纸加工定制其它类型的气体终端,包括法国标准、印度标准、日本标准或南非标准。

我公司严格按照国际标准进行加工生产,确保所生产的气体终端与其它公司生产的插头通配,同时保证我公司所生产的插头与其它公司的气体终端通配(要求其它公司的气体终端或插头必须符国国际规范要求)。

我公司生产的英标终端有以下几种气体:氧气、负压、压缩空气、笑气、氦气、二氧化碳气体、AGSS。连接管可以是铜管(一般选用 Φ10 的铜管),也可以是气管接头,铜管可安装在病房设备带内或直接安装在墙式终端盒内,用于与气体管道的铜管焊接。气管接头主要安装在手术室吊塔上,与压力软管连接。我公司提供墙式气体终端盒,与英标气体终端配套使用。

德标气体终端目前开发出 4 种气体,包括氧气、负压、压缩空气及 AGSS,也有铜管及气管接头两种接头形式。我公司可提供对应的各种气体的插头。

美标气体终端包括 6 种气体,分别是氧气、负压、压缩空气、笑气、氦气及二氧化碳气体。目前只提供铜管接头。各种气体终端对应的插头均可提供。

我公司的气体终端生产已经通过了 ISO9001-2000 质量体系认证。目前已经广泛应用于中东、东南亚等国家。

二、 工作原理

气体终端实际上是一种阀门类产品,有些类似轮胎的气门芯,当用外力推动阀芯时,阀门打开,气体流出,当撤掉外力时,阀芯在气压及弹簧的作用力下自动关闭,从而起到密封气体的作用。

市场上流行多种标准的气体终端,其原理基本相似,就是关闭状态下密封气体,打开状态下释放气体。不同标准的气体终端,仅是外形、定位、插头形状有所区别,其功能、工作原理都是相似的。



气体终端主要安装在病房的设备带上(或吊塔上、设备墙上),平时处于关闭状态,当 需要使用气体时,用一个插头顶开阀芯,则气体就会流出,如果插头连续顶住阀芯,则气体就会连续流出。

三、 产品分类

- 1、 英标终端及插头
 - 气体终端制造标准执行 BS EN 737-1 标准
 - 气体快速插头制造遵循 BS 5682 标准
 - AGSS 的加工制造标准执行 BS 6834 标准
 - 气体终端的应用符合 HTM2022 的标准
 - 医用7种气体终端及快速插头均可以提供,包括氧气、负压、压缩空气、笑气、 氦气、二氧化碳、AGSS等,不同气体有不同的插口
 - 气体终端的接头有两种,一种是Φ10的铜管,一种是软管接头
 - 采用 ISO32 颜色标准进行气体识别
 - 提供安装底座及塑料套圈,辅助进行装配
 - 提供配套的墙式安装塑胶盒,可以实现明装,亦可以实现暗装。
 - 气体终端插头有两级卡口装置,第一级的作用是固定设备(如湿化瓶等),第二级的作用是打开阀芯。

2、 德标终端及插头

- 按照 EN 737-1:1998 和 DIN 13620-2 标准进行加工制造
- 采用 ISO32 颜色标准识别气体
- 采用不同插口形状以区分不同气体
- 多种安装方式,可以是外径Φ8的进气管,也可以是气管接头
- 按 EN737-1 标准 100%出厂测试
- 100%进行气密性测试
- 带检修阀,维护方便

3、美标终端及插头

- 符合 ISO9710,HTM2033,C11 标准
- 分 Ohmeda、Chemetron、Puritan-Bennett、DISS 等四种款式
- 气体指定设计(颜色、结构)不同气体不能互换,避免安装错误
- 前后座结构,同种气体终端后座通用



- 进气管可 360 度旋转,安装方便
- Φ8mm K型铜管(外径Φ10)
- 100%气密性测试每个终端在出厂前都已通过测试
- 多年的设计及制造终端的经验

4、国标终端及插头

- 国标终端借鉴日式终端的制造标准,终端插头与日式终端插头完全兼容。
- 终端底座有多种款式可供选择,终端与气管的连接也有多种方式,有焊接方式 的,有球头球帽连接方式的。
- 我公司有氧气、负压、空气、笑气、二氧化碳、氮气、废气回收等 7 种气体的 终端可供用户选择
- 适合安装在设备带上或吊塔内。与软管连接时,终端的连接端为宝塔形**连**
- 出厂前经过100%气密性测试,可以安全放心使用。
- 不同终端,标签颜色都不同,按 ISO32 标准进行标识

四、 产品图片









KB6103 法标负压终端	KB6103 法标空气终端	KB6100 国标笑气终端
Socker Age W	Cocket Living M	Socker Adde N
KB6100 国标空气终端	KB6100 国标负压终端	KB6100 国际氧气终端
英标终端插头	德标终端插头	美标终端插头
美标終端插头	美标终端插头	国标终端插头

五、 联系方式

办公地址: 上海市长宁区安顺路 83 号 8 楼

邮政编码; 200052

电话: 021-62940309, 52308601 传真: 021-62817095(自动)

网址: www.kbmed.net

邮件: contactus@kingbell.net